

Mode d'emploi PrWAINUA®

éplontersen injectable, voie sous-cutanée

Auto-injecteur prérempli à dose unique contenant 45 mg/0,8 mL



Ce mode d'emploi contient des renseignements sur la façon d'injecter WAINUA à l'aide de l'auto-injecteur.

Lire ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'auto-injecteur WAINUA et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Il pourrait y avoir de nouveaux renseignements. Ce document ne remplace pas une discussion avec votre professionnel de la santé au sujet de votre état de santé ou de votre traitement.

Votre professionnel de la santé doit vous montrer, à vous ou à votre aidant, comment utiliser WAINUA correctement. Si vous ou votre aidant avez des questions, parlez-en à votre professionnel de la santé.

La dose est administrée uniquement sous forme d'injection sous la peau (injection sous-cutanée).

Renseignements importants que vous devez connaître avant d'utiliser WAINUA

- WAINUA est conçu uniquement pour une utilisation sous la peau (injection sous-cutanée).
- Chaque auto-injecteur contient une dose et ne peut être utilisé qu'une seule fois.
- **Ne pas** partager votre auto-injecteur avec une autre personne.
- **Ne pas** utiliser l'auto-injecteur si :
 - il a été congelé ou chauffé
 - il a été échappé, endommagé ou semble avoir été altéré
 - la date de péremption est dépassée (EXP)

Conservation de l'auto-injecteur WAINUA

- Conserver WAINUA au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C) dans sa boîte d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser, afin de le protéger de la lumière.
- Si nécessaire, l'auto-injecteur peut être conservé à température ambiante (jusqu'à 30 °C) dans la boîte d'origine pendant un maximum de 6 semaines. S'il n'est pas utilisé dans les 6 semaines, il faut le jeter dans un contenant pour objets pointus et tranchants.
- **Ne pas** retirer le capuchon transparent avant d'être prêt à injecter WAINUA.


Garder l'auto-injecteur et tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants.

Votre auto-injecteur WAINUA


Ne pas retirer le capuchon avant d'être prêt à faire l'injection.

Ne pas toucher au protecteur d'aiguille orange.

Avant l'injection

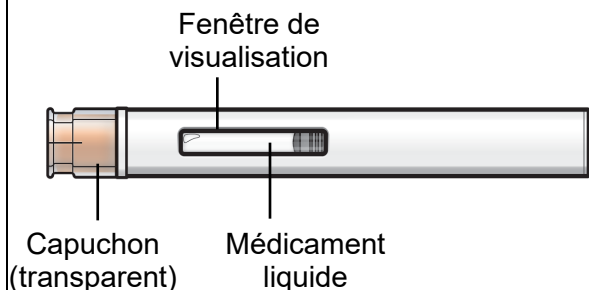

Après l'injection

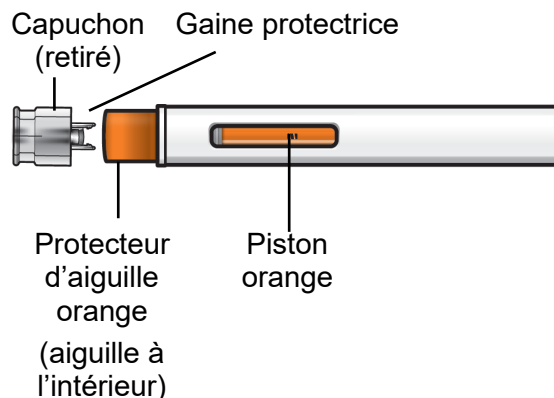


Comment fonctionne l'auto-injecteur WAINUA?

L'injection commence automatiquement lorsque le protecteur d'aiguille orange est poussé contre la peau.

L'auto-injecteur doit être maintenu fermement contre la peau pour permettre l'administration de la dose complète du médicament.


L'injection est terminée **uniquement** lorsque la fenêtre est complètement orange (non illustré).

Lire l'intégralité du mode d'emploi avant de retirer le capuchon et d'injecter le médicament.

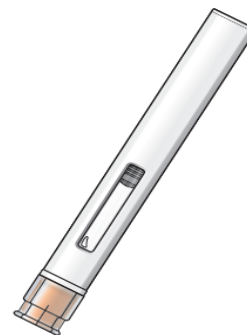

Préparation de l'injection de WAINUA

Étape 1 – Rassembler le matériel pour l'injection

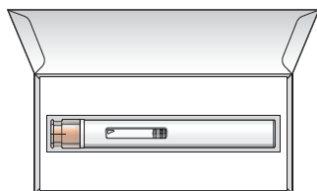

1 auto-injecteur tout juste sorti du réfrigérateur



1 tampon d'alcool



1 tampon d'ouate ou de gaze



1 petit pansement



1 contenant résistant aux perforations pour l'élimination des objets pointus et tranchants

Matériel non inclus

Étape 2 – Inspecter la boîte et attendre 30 minutes

Laisser l'auto-injecteur dans sa boîte à température ambiante pendant 30 minutes avant l'injection.

- **Ne pas** réchauffer l'auto-injecteur d'une autre façon. Par exemple, **ne pas** le réchauffer au micro-ondes ni sous l'eau chaude, ni le mettre à proximité d'autres sources de chaleur.
- Conserver l'auto-injecteur à l'abri de la lumière et des rayons directs du soleil.



Étape 3 – Retirer l'auto-injecteur de sa boîte et l'inspecter

Vérifier si l'auto-injecteur est endommagé.


- **Ne pas** utiliser si le capuchon transparent a été retiré ou s'il n'est pas fixé.
- **Ne pas** utiliser l'auto-injecteur s'il semble endommagé.

Vérifier la date de péremption (EXP).

- **Ne pas** utiliser si la date de péremption est dépassée.

Examiner le liquide par la fenêtre de visualisation.

- La présence de petites bulles d'air dans le liquide est normale.
- Le liquide doit être limpide et incolore à jaunâtre.
- **Ne pas** injecter si le liquide est trouble, a changé de couleur ou contient des particules.

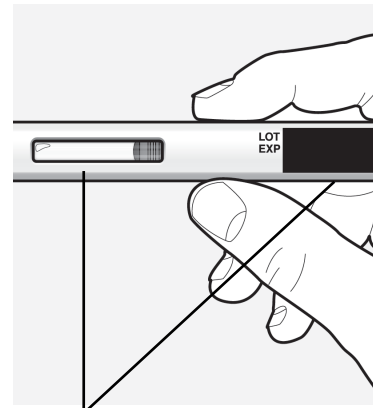

Inspecter

Injection de WAINUA

Étape 4 – Choisir le point d'injection

Vous ou votre aidant pouvez injecter WAINUA sur le devant de votre cuisse ou dans la partie inférieure de votre ventre (abdomen).


Un aidant peut également vous injecter le médicament à l'arrière du bras.

Ne pas essayer de vous injecter vous-même à l'arrière du bras.

Pour chaque injection, choisir un nouvel endroit situé à au moins 3 cm (1 pouce) du dernier point d'injection.

Ne pas injecter :

- à moins de 5 cm (2 pouces) du nombril
- là où la peau est rouge, chaude, sensible, meurtrie, squameuse ou dure
- dans une cicatrice ou une zone de peau abîmée, décolorée ou tatouée
- à travers les vêtements

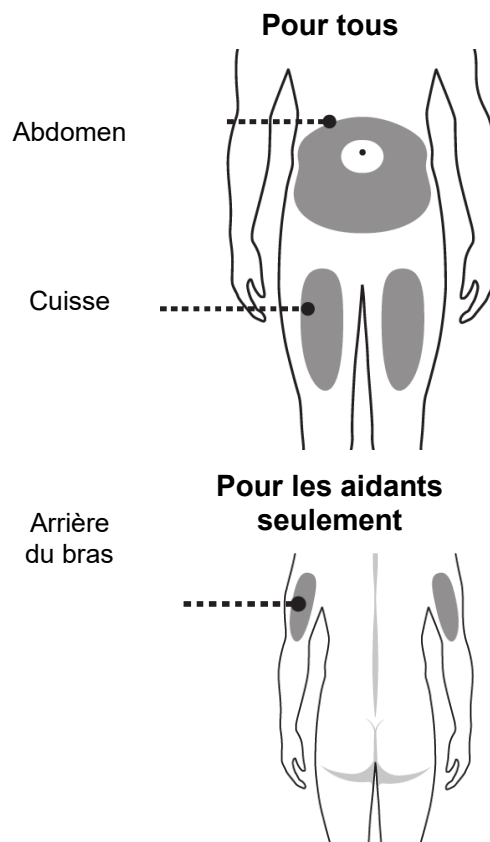


Étape 5 – Se laver les mains et nettoyer le point d'injection

Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon.

Nettoyer le point d'injection avec un tampon imbibé d'alcool. Laisser la zone sécher à l'air.


- **Ne pas** toucher à la zone nettoyée avant l'injection.

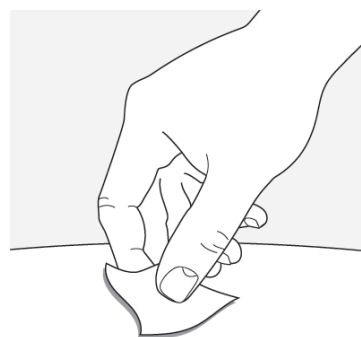

Étape 6 – Retirer le capuchon

Tenir le corps de l'auto-injecteur d'une main et retirer le capuchon transparent de l'autre main avec précaution, d'un seul coup. **Ne pas** retirer le capuchon en le tournant. Le protecteur d'aiguille orange est maintenant exposé et l'aiguille se trouve à l'intérieur.

- Jeter le capuchon transparent.
- **Ne pas** toucher l'aiguille ni pousser sur le protecteur d'aiguille orange avec votre doigt.
- **Ne pas** remplacer le capuchon sur l'auto-injecteur. Cela pourrait déclencher la sortie prématurée du médicament ou endommager l'auto-injecteur.




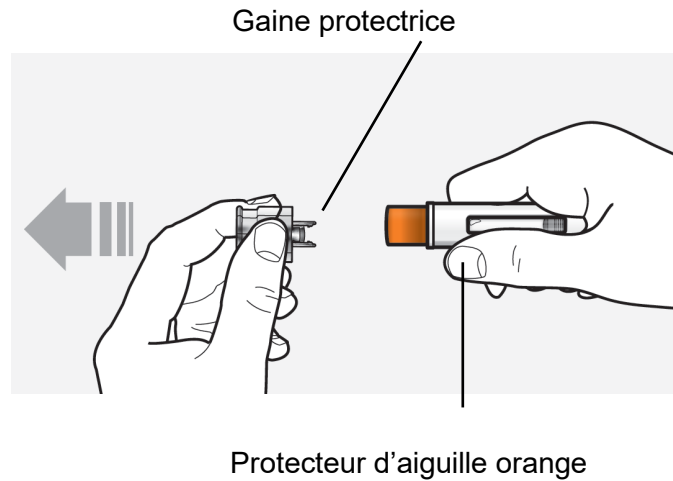


Étape 7 – Injecter WAINUA

Injecter WAINUA à l'aide de l'auto-injecteur en suivant les étapes illustrées aux figures **a**, **b**, **c** et **d**.

Pendant l'injection, appuyer sur l'auto-injecteur et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le piston orange remplisse la fenêtre de visualisation. Vous entendrez un premier «clac» au début de l'injection et peut-être un deuxième «clac» pendant l'injection. C'est normal.

Ne pas bouger ni changer la position de l'auto-injecteur une fois l'injection commencée.

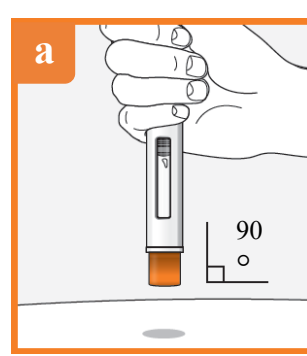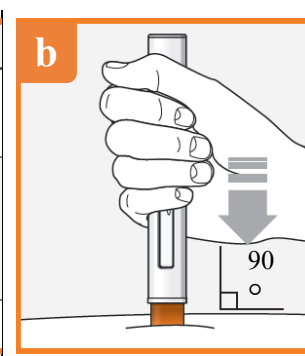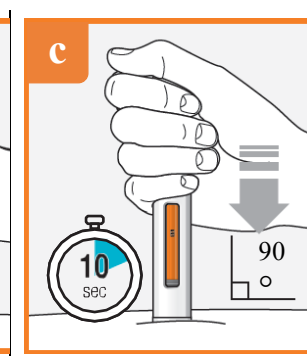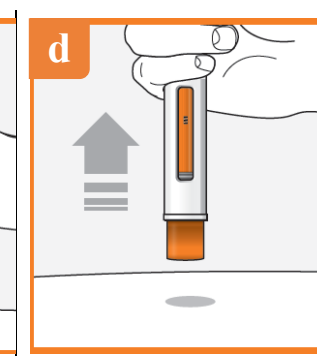			
Positionner l'auto-injecteur. - Placer le protecteur d'aiguille orange à plat contre la peau (angle de 90 degrés). - S'assurer que la fenêtre de visualisation est visible.	Appuyer fermement et maintenir l'auto-injecteur enfoncé. - Vous entendrez un premier «clac» qui vous indiquera que l'injection a débuté. - Le piston orange se déplacera vers le bas de la fenêtre de visualisation.	Maintenir fermement enfoncé pendant environ 10 secondes. - Vérifier que le piston orange remplit la fenêtre de visualisation. - Vous pourriez entendre un deuxième «clac» pendant l'injection.	Une fois l'injection terminée, tirer l'auto-injecteur en ligne droite. Le protecteur d'aiguille orange glissera vers le bas et se verrouillera en place sur l'aiguille.


Étape 8 – Vérifier la fenêtre de visualisation

Vérifier la fenêtre de visualisation pour s'assurer que tout le médicament a été injecté.

Si le piston orange ne remplit pas la fenêtre de visualisation, vous n'avez peut-être pas reçu la dose complète.

Si cela se produit ou si tout autre problème survient, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.


Ne pas réutiliser l'auto-injecteur.

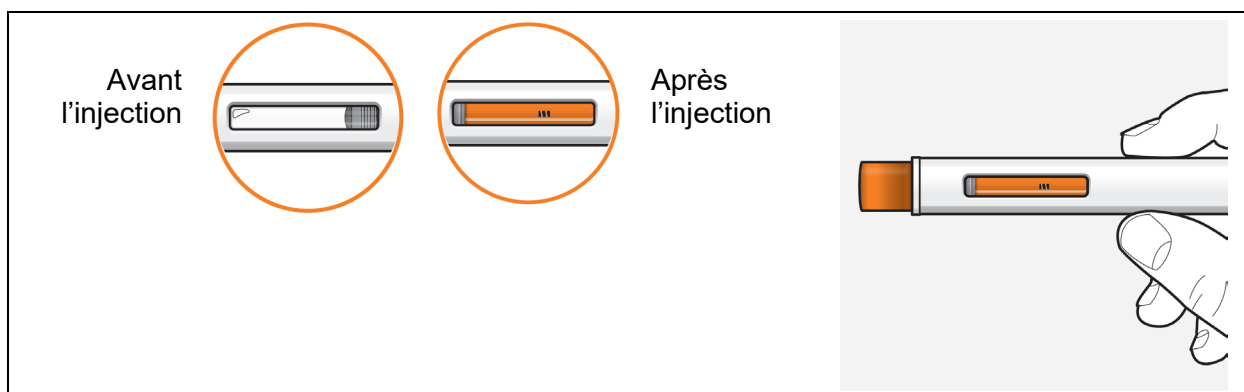

Étape 9 – Vérifier le point d'injection

Il peut y avoir une petite quantité de sang ou de liquide au point d'injection. C'est normal.

Au besoin, appuyer sur la zone avec un tampon d'ouate ou de gaze et appliquer un petit pansement..

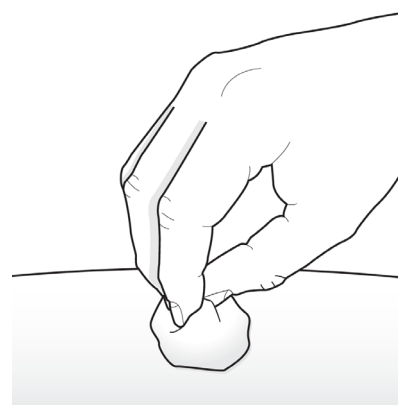

Étape 10 – Jeter l'auto-injecteur après son utilisation

Placer l'auto-injecteur dans un **contenant pour objets pointus et tranchants** tout de suite après son utilisation.

Ne pas jeter l'auto-injecteur dans les ordures ménagères.



Directives concernant la mise au rebut

Jeter le contenant plein selon les directives de votre professionnel de la santé ou de votre pharmacien.

Ne pas jeter le contenant pour objets pointus et tranchants dans les ordures ménagères.

Ne pas recycler le contenant pour objets pointus et tranchants.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site www.astrazeneca.ca/fr ou appeler au 1-800-461-3787. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.

WAINUA® est une marque déposée d'AstraZeneca AB, utilisée sous licence par AstraZeneca Canada Inc. Le logo d'AstraZeneca est une marque déposée d'AstraZeneca AB, utilisée sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

© AstraZeneca Canada Inc. 2025